


# Anleitung zur Benutzung des FeLV Ag Test



Fülllinie (schwarzer Strich) 1 Tropfen (10µl)

# 1

**Probenahmen & eingeben**

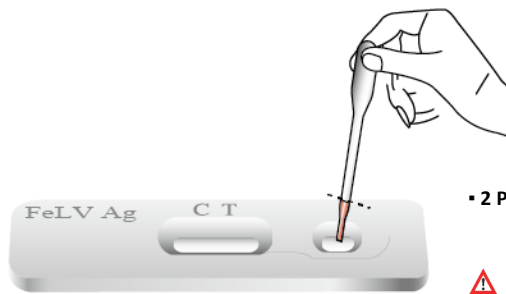


X2  
2 gouttes

• 2 Probetropfen für FeLV Ag (20µl)

⚠ Nicht überladen!

# 2

**Aufnahme**

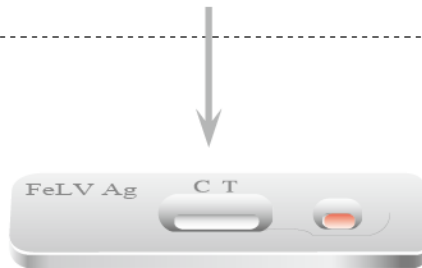

Warten bis die Probe aufgenommen ist

# 3

**Reaktionsmittel zufügen**



2 Tropfen Reagenzflüssigkeit  
⚠ Nach vollständiger Aufnahme!



# 4

**Ablesen**

00:05:00~00:10:00



Innerhalb 5-10 Minuten Ergebnis ablesen



# 5

**Entsorgen**

Nach 10 Minuten wird das Ergebnis ungültig

00:10:00



Dispositiv entsorgen

