

Anleitung zur Benutzung des Giardia Ag Test



Fülllinie (schwarzer Strich) 4 Tropfen : 100µl

1

- Kein Klebstreifen
- Keine feste Kotteilchen
- Nicht überladen
- Maximum 30mg Kot Auftragen
(Abbild: Tupfer mit 30mg Kot)



Das Probenentnahmeröhrchen mit dem Tupfer schütteln

Probenahme

2

Geklärte Flüssigkeit benutzen




Warten bis die Kotpartikeln sich am Boden sammeln



Geklärte Schicht zur Entnahme mit der Pipette

Kotpartikel Schicht

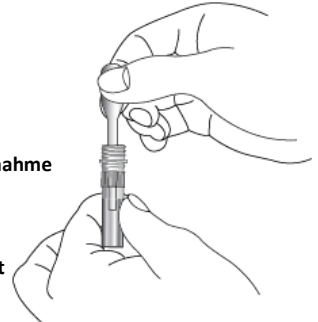


3

Probefeld laden

• 4 Tropfen (100µl) Verflüssigte Probe

⚠ Nicht überladen

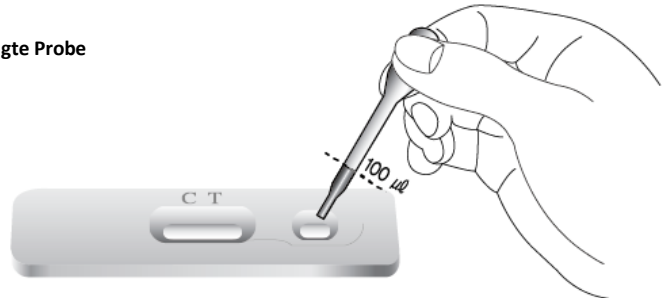

4

Ablesen

00:05:00~00:10:00



Innerhalb 5 bis 10 Minuten Ergebnis ablesen



5

Entsorgen

Nach 10 Minuten wird das Ergebnis ungültig

00:10:00



Dispositiv entsorgen

