

# Procédure d'utilisation du test Giardia Ag



Dose d'échantillon : 100µl

# 1


## Prélèvement

Ne pas utiliser de papier collant ou de morceau de matières fécales

Ne pas collecter trop de matières fécales

Quantité maximale : 30 mg

(Fig : écouvillon avec 30 mg de matières fécales)

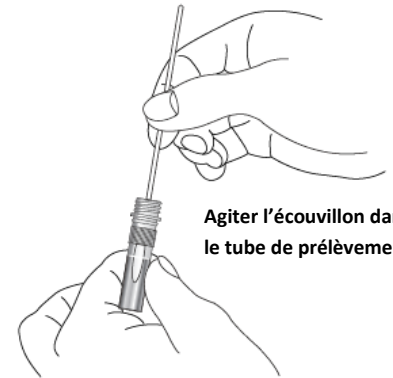

Agiter l'écouvillon dans le tube de prélèvement

# 2


## Utiliser la couche de surnageant

Attendre que les particules de matières fécales se déposent au fond du tube de prélèvement



Couche de surnageant à utiliser comme échantillon

Couche de particules de matières fécales

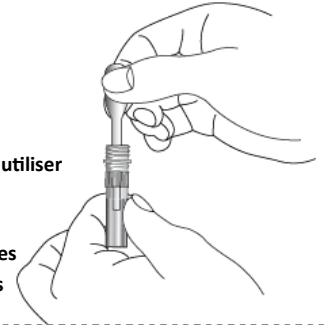

# 3

## Dépôt des échantillons

4 gouttes d'échantillon (100µl) dans le puits de prélèvement

⚠ Ne pas surdoser l'échantillon



# 4

## Lecture

00:05:00~00:10:00



Lecture des résultats entre 5 et 10 min



# 5

## Elimination

Résultats invalides après 10 min

00:10:00



Jeter le kit utilisé

