


Procédure d'utilisation du test FIP Ab



Dose d'échantillon (ligne noire): 1 goutte (10 μ l)


1 Prélèvement & dépôt des échantillons

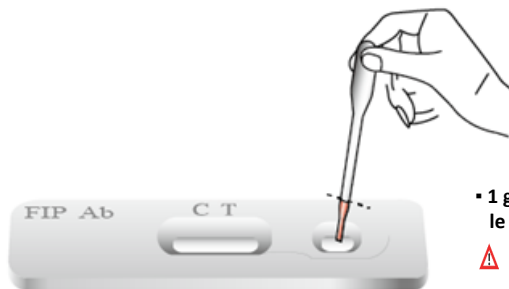

• 1 goutte d'échantillon (10 μ l) dans le puits de prélèvement

⚠ Ne pas surdoser l'échantillon

2 Absorption

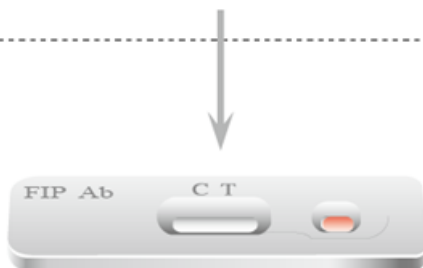

Attendre une complète absorption

3 Ajout du réactif




2 gouttes de réactif
⚠ Après complète absorption



4 Lecture

00:05:00-00:10:00

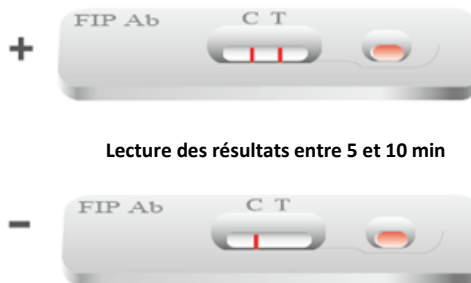

Lecture des résultats entre 5 et 10 min

5 Elimination

Résultats invalides après 10 min

00:10:00



Jeter le kit utilisé

