

Anleitung zur Benutzung des test :

FBT - Feline Blutgruppenbestimmung

 Tatsächliche Grösse der Pipette



Blutmenge (30 μ l) für den FBT-Test

1

Probenentnahme



Frisches Blut mit einer Pipette entnehmen
Einen Tropfen (30 μ l) der Probe in das Röhrchen mit dem Verdünnungspuffer geben

2

Mischen



Genügend Blut und Verdünnungspuffer
durch Umdrehen des Röhrchens vermengen



3

Probefeld laden

 Nicht überladen!



4

Ablesen

00:04:00~00:05:00



Typ A

Typ B

Typ AB

5

Entsorgen

00:05:00



Dispositiv entsorgen

Nach 5 Minuten wird das Ergebnis ungültig

