

Procedura di utilizzo del test

FBT - Tipizzazione del gruppo sanguigno felino

 Dimensioni effettive della pipetta



Quantità di sangue (30 µl) per il test FBT

1

Prelievo



Prelevare sangue fresco utilizzando una pipetta
Aggiungere una goccia di campione (30 µl) alla provetta
contenente il tampone di diluizione

2

Miscelazione



Unire una quantità sufficiente di campione e
tampone di diluizione capovolgendo la provetta



3

Deposito dei campioni

 Non sovradosare il campione



4

Letture

00:04:00~00:05:00



Tipo A

Tipo B

Tipo AB

5

Smaltimento

00:05:00



Smaltire il kit usato

Risultati non validi dopo 5 minuti

