

Procédure d'utilisation du test FPV Ag




Dose d'échantillon : 100 μ l

1

Prélèvement

1. Ne pas utiliser de papier collant ou de morceau de matières fécales
2. Ne pas collecter trop de matières fécales
Quantité maximale : 30 mg
(Fig : écouvillon avec 30 mg de matières fécales)

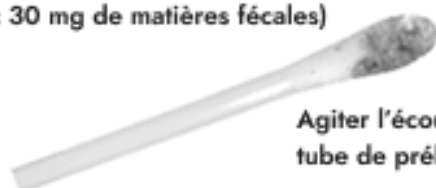

Agiter l'écouvillon dans le tube de prélèvement



2

Utiliser la couche de surnageant

Attendre que les particules de matières fécales se déposent au fond du tube de prélèvement



Couche de surnageant à utiliser comme échantillon
Couche de particules de matières fécales



3

Dépôt des échantillons

- 4 gouttes d'échantillon (100 μ l) dans le puits de prélèvement
⚠ Ne pas surdoser l'échantillon



4

Lecture

00:05:00-00:10:00



5

Elimination

00:10:00



Jeter le kit utilisé
Résultats invalides après 10 min

