

Procedura di utilizzo del test FPV Ag



Volume del campione : 100µl

1

Prelievo del campione

1. Non utilizzare carta assorbente o frammenti di feci.

2. Non raccogliere una quantità eccessiva di feci

Quantità massima : 30 mg

(Fig.: tampone con 30 mg di feci)



Agitare il tampone
nella provetta di
prelievo



2

Utilizzare lo strato di surnatante

Attendere che le
particelle fecali si
depositino sul fondo
della provetta di
prelievo



Strato di surnatante da
utilizzare come campione

Strato di
particelle fecali



3

Deposito dei campioni

4 gocce di campione (100µl) nel pozzetto di prelievo

⚠ Non sovradosare il campione



4

Lettura dei risultati

00:05:00-00:10:00



+



Lettura dei risultati tra 5 e 10 min

-



5

Smaltimento

00:10:00



Smaltire il kit utilizzato

I risultati ottenuti dopo 10 minuti
sono da considerarsi non validi

