


Istruzioni per il test FeLV Ag



Linea di riempimento del campione (linea nera): 1 goccia (10 µl)

1

Prelievo e caricamento

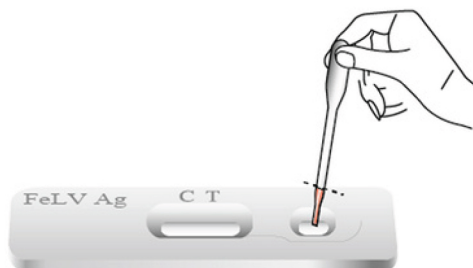

2 goccia di campione
Non sovraccaricare con il campione

2


Assorbimento



Attendere il completo assorbimento.

3

Aggiunta della soluzione tampone

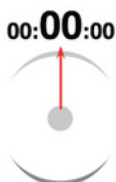

2 gocce di soluzione tampone
**dopo il completo assorbimento.



4

Lettura

00:05:00~00:10:00



Leggere il risultato tra 5 e 10 minuti.



5

Smaltimento

00:10:00



Eliminare il dispositivo utilizzato.
Risultato non valido dopo 10 minuti.

