



Anleitung zur Benutzung des test :

CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/Lyme Ab



Fülllinie (schwarzer Strich) 1 Tropfen (10µl)

1

Probenahmen & eingeben



1 Tropfen Probe (10 µl) in die Probenvertiefungen

⚠ Nicht überladen!

2

Aufnahme



Warten bis die Probe aufgenommen ist

3

Reaktionsmittel zufügen

00:00:00



2 Tropfen Reagenzflüssigkeit

⚠ Nach vollständiger Aufnahme!

4

Ablesen

00:05:00~00:10:00



+
Innerhalb 5-10 Minuten Ergebnis ablesen

5

Entsorgen

Nach 10 Minuten wird das Ergebnis ungültig

00:10:00



Dispositiv entsorgen

