



Procedura di utilizzo del test


CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/Lyme Ab



Volume del campione (linea nera): 1 goccia (10µl)

1

Prelievo del campione

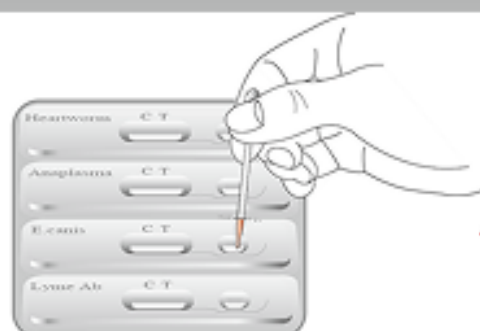

1 goccia di campione (10 µl) nei pozzetti di campionamento

⚠ Non sovradosare il campione

2


Assorbimento



Attendere il completo assorbimento

3

Aggiunta del reagente

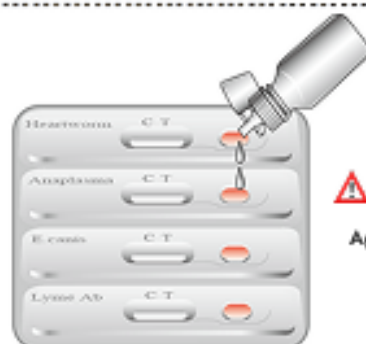

⚠ Dopo il completo assorbimento

Aggiungere 2 gocce di reagente

4

Letture

00:05:00-00:10:00



+
Tempo di lettura dei risultati: da 5 a 10 minuti



-

5

Smaltimento



Smaltire il kit usato

Risultati non validi dopo 10 minuti

